

oral design Berlin の ZTM Jürgen Mehrhof が開発した
独自の保湿ポーセレンパレットシステム

aqua line アクアライン



まずセルローズの一片を湿らせてください。



クランピングフレームを開き、ガラス練板の下に水を張って、セルローズを置きます。



セルローズを挟んだ状態でフレームを下ろします。



通常通りモデリングリキッドで陶材を練和します。



ホイップ状の陶材をセルローズに接するように置きます。



リキッドの効果も失われず、問題なく築盛できます。



陶材が少量でも、良い状態を保ち水分過剰になることはありません。



数日経過してもパレット状の陶材は最適な状態を保ちます。



スポンジ置場はスポンジが湿り過ぎないようにしています。



ステイントレーは、レストの中に取り納できるようになっています。



ステイントレーは 24 色分と、練用の広めのスペースがあります。



使用しない時はベースプレートカバーの中へ格納することができ、ほこり防止にもなります。

Distributed by

有限会社ファクト

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚 1-62-7-1004

TEL 03-5304-9310 FAX 03-5304-9312

e-mail info@fact-creation.com

URL http://fact-creation.com



aqua line

Design by Jürgen Mehrhof

定価（消費税別）

アクアライン / ステイントレー付き 50,000 円

アクアライン / ステイントレー無し 42,000 円